

CONTADOR DE CELULAS ELECTRÓNICO MARCA CLINILAB

DESCRIPCION DE TECLAS:

TECLAS A, B, C, D, E: Teclado de conteo cada contador puede contar hasta 99 , cuando el conteo llega a 100 se escuchara una alarma sonora indicando este evento.

TECLA BORRAR: Se utiliza para reiniciar el conteo, presionando esta tecla el contador vuelve a cero(0).

INTERRUPTOR VERDE: Interruptor de encendido, enciende y apaga el equipo

OPERACIÓN:

1. Se enciende el piano contador colocando el interruptor de encendido en la posición 1
2. Se realiza el conteo presionando las teclas respectivas A, B, C, D, E. Emite una señal sonora indicando que se presiono adecuadamente. Estos valores se van incrementando uno a uno, y la suma de ellas se muestra en la pantalla con la palabra TOTAL.
3. Cuando el conteo total llega a 100, el equipo emite una alarma sonora .
4. Para reiniciar el conteo, se presiona la tecla BORRAR e inmediatamente todos los contadores quedan en ceros.
5. Si pasados 1 minuto ninguna tecla del contador es activada, este mostrara su protector de pantalla el cual se desactiva presionando una de las teclas de conteo. Cuando se activa el protector de pantalla, los valores de conteo se mantienen.



**¡Siente tu bandera,
cree en tu país!**

VISION

**“Reconocida como líder en diseño y desarrollo de equipos de excelente calidad,
fundamentada en la investigación y el servicio.”**