



EQUIPO: Termo Incubadora Digital Microcontrolada Universal Para Indicadores biológicos.



CARACTERISTICAS: Este equipo fue diseñado y fabricado pensando en los diferentes tipos y formas de indicadores biológicos y las temperaturas a los cuales se deben incubar. Puede aceptar indicadores de las siguientes casas ya sea para autoclaves a Vapor de Agua o por oxido de Etileno: 3M, Brown, Raven, Merck, Braun, Biotech. Lo que facilita la adquisición y la economía en cuanto a los indicadores por parte de quien la adquiere.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

ALIMENTACION:	120 Voltios AC
POTENCIA:	30 Vatios
RANGO DE AJUSTE DE TEMP.	+2° C sobre temperatura Ambiente a 90° Celsius
VARIACION DE TEMPERATURA:	+/- 0.5° Celsius (Diferencial)
TIPO DE TRABAJO:	Continuo.

FUNCIONAMIENTO:

De acuerdo a la especificación del indicador a utilizar seleccionar la temperatura.

Ajuste:

- Presionar la tecla “AJUSTE” y pulsando las teclas “SUBE” o “BAJA” seleccionar la temperatura requerida.
- De nuevo presionar la tecla “AJUSTE” y el equipo empieza a Operar.

VISION

“Reconocida como líder en diseño y desarrollo de equipos de excelente calidad, fundamentada en la investigación y el servicio.”